

Hydro 7 navodilo za uporabo

Hydro 7 vodna črpalka je udobna, varna in naravna metoda za povečanje penisa v zasebnosti vašega doma (v kopalnici). Izdelana je tako, da jo uporabljate v kopalni kadi oz. pod tušem. V samo nekaj tednih, pri uporabi 15 – 20 minut dnevno, boste z Hydro 7 črpalko pridobili debelejši, daljši močnejši in večji penis! Imeli boste trdnejšo in močnejšo erekcijo. Hydro 7 črpalka pomaga tudi pri motnjah erekcije, prezgodnji ejakulaciji in Peyronijevi bolezni.

Čemu je namenjena

- Poveča penis za 2 – 5 cm
- Poveča obseg penisa
- Vpliva na vašo samozavest
- Poveča seksualno vitalnost
- Intenzivira vaš orgazem
- Popravi ukrivljenost penisa
- Pomaga pri prehitri ejakulaciji
- Pomaga pri motnjah erekcije
- Lahko pomaga pri Peyronijevi bolezni

Hydro 7 navodilo za uporabo

1. V kopalno kad nalijte toplo vodo, da vam, ko sedite v kadi, sega do bokov.
2. Sedite v kadi cca. 5 minut in počakajte, da se vaše genitalije ogrejejo in sprostijo.
3. Hydro 7 črpalko potopite v vodo in počakajte, da se popolnoma napolni z vodo (da ni več zraka v njej)
4. Sedaj vanjo potisnite penis (črpalka mora biti polna vode), črpalko pa potisnite proti telesu do predela pubisa, da začutite vakum. Odvečna voda bo iz črpalke iztekla na zgornjem delu črpalke. Črpalko nekajkrat potisnite proti telesu, da iz nje odstranite ves zrak in ustvarite pravšnji vakum.
5. Sedaj samo sedite in počakajte, da Hydro 7 opravi svojo nalogo.
6. Vsakih 4 ali 5 minut ponovno potisnite črpalko navzdol, da povečate pritisk. Ker se bo vaš penis širil, bo odvečna voda iztekala skozi vrh črpalke vsakič, ko jo boste potisnili navzdol. Ob vsakem črpanju boste dosegli točko, ko bo manšeta črpalke popolnoma stisnjena in ste dosegli maksimalni pritisk.
7. S črpalko črpajte do optimalnega vakuma – to je takrat, ko iz nje ne priteče več voda, ko jo potiskate navzdol.
8. Če je pritisk premočan, nežno aktivirajte ventil na vrhu črpalke in zmanjšajte pritisk.
9. Po 20 minutah uporabe sprostite pritisk (na vrhu črpalke je ventil) in snemite črpalko. Vstanite in rezultat bo viden takoj.

Če nimate kopalne kadi, lahko črpalko uporabljate tudi pod tušem oz. ob umivalniku. Postopek je podoben kot pri uporabi v kopalni kadi:

- Stojte pod tušem cca. 5 minut, da segreje in sprostite genitalije.
- Ventil črpalke zatesnite z roko in črpalko napolnite z vodo.
- V črpalko vstavite penis in jo potisnite proti telesu, da ustvarite vakum. Odvečna voda bo iz črpalke iztekla na zgornjem delu črpalke.
- Črpalko nekajkrat potisnite proti telesu, da iz nje odstranite ves zrak in ustvarite pravšnji vakum.
- Nadaljni postopek je enak kot pri uporabi črpalke v kopalni kadi.

Priporočeno je, da se črpalko uporablja 1 x dnevno 15 – 20 minut. Najboljši rezultat boste dosegli, če boste črpalko uporabljali vsaj 3 x tedensko

Lolita erotic shop, www.lolita.si, info@lolita.si