

HydroXtreme 7 set navodilo za uporabo

- vodna črpalka HydroXtreme 7
- velik luksuzni kovček za hranjenje črpalke
- gumijasta cev in nastavek za črpanje
- HydroXtreme brisača
- čistilno krtačko
- merilni trak
- držalo za med prhanjem

HydroXtreme 7 črpalka je udobna, varna in naravna metoda za povečanje penisa v zasebnosti vašega doma. Izdelana je tako, da jo lahko uporabljate v kopalni kadi oz. pod tušem ali kot klasično črpalko – z ustvarjanjem vakuma.

V samo nekaj tednih, pri uporabi 15 – 20 minut dnevno, boste z HydroXtreme 7 črpalko pridobili debelejši, daljši, močnejši in večji penis! Imeli boste trdnejšo in močnejšo erekcijo. HydroXtreme 7 pomaga tudi pri motnjah erekcije, prezgodnji ejakulaciji in Peyronijevi bolezni.

Čemu je namenjena

- Poveča penis za 2 – 5 cm
- Poveča obseg penisa
- Vpliva na vašo samozavest
- Poveča seksualno vitalnost
- Intenzivira vaš orgazem
- Popravi ukrivljenost penisa
- Pomaga pri prehitri ejakulaciji
- Pomaga pri motnjah erekcije
- Lahko pomaga pri Peyronijevi bolezni

HydroXtreme 7 set navodilo za uporabo črpalke s pomočjo vode

1. V črpalko nalijte toplo vodo, več kot je vode, več tlaka ustvari
2. V črpalko potisnite penis, črpalko pa potisnite proti telesu do predela pubisa, da začutite vakum. Odvečna voda bo iz črpalke iztekla na zgornjem delu črpalke. Črpalko nekajkrat potisnite proti telesu, da iz nje odstranite ves zrak in ustvarite pravšnji vakum.
3. Sedaj samo sedite in počakajte, da HydroXtreme 7 opravi svojo nalogo.
4. Vsakih 4 ali 5 minut ponovno potisnite črpalko navzdol, da povečate pritisk. Ker se bo vaš penis širil, bo odvečna voda iztekala skozi vrh črpalke vsakič, ko jo boste potisnili navzdol. Ob vsakem črpanju boste dosegli točko, ko bo manšeta črpalke popolnoma stisnjena in ste dosegli maksimalni pritisk.
5. S črpalko črpajte do optimalnega vakuma – to je takrat, ko iz nje ne priteče več voda, ko jo potiskate navzdol.
6. Če je pritisk premočan, nežno aktivirajte ventil na vrhu črpalke in zmanjšajte pritisk.
7. Po 20 minutah uporabe sprostite pritisk (na vrhu črpalke je ventil) in snemite črpalko. Vstanite in rezultat bo viden takoj.

Pod tušem

1. Stojte pod tušem cca. 5 minut, da segrejete in sprostite genitalije.
2. Črpalko napolnite z vodo.

3. V črpalko vstavite penis in jo potisnite proti telesu, da ustvarite vakum. Odvečna voda bo iz črpalke iztekla na zgornjem delu črpalke. Črpalko nekajkrat potisnite proti telesu, da iz nje odstranite ves zrak in ustvarite pravi vakum.
4. Nadaljni postopek je enak kot pri uporabi črpalke v kopalni kadi.

Priporočeno je, da se črpalko uporablja 1 x dnevno 15 – 20 minut. Najboljši rezultat boste dosegli, če boste črpalko uporabljali vsaj 3 x tedensko.

Ko črpalke ne želite uporabljati s pomočjo vode, namestite cevčico in meh za iztiskanje zraka:

a) Za vzpostavitev erekcije

Črpalko pritisnite na predel pubisa, s pumpico pa regulirate jakost tlaka v črpalki, dokler ne dosežete zadovoljive erekcije. Ko je erekcija dosežena, potegneta črpalko s penisa. Erekcija nastane s povečanim dotokom krvi v penis.

b) Za povečanje penisa

Postopek je enak, vendar namesto, da črpalko odstranite, skozi varnostno odprtino spustite zrak iz črpalke in s pumpico ponovno izsesajte zrak iz črpalke.

Na ta način "vadite", penis pa se izmenično krči in razteza.

Priporočeno je, da se črpalko uporablja 1 x dnevno 15 – 20 minut. Najboljši rezultat boste dosegli, če boste črpalko uporabljali vsaj 3 x tedensko.