

Mehki tamponi

Uživaj svoje življenje... vsak dan!

...med plavanjem, med ukvarjanjem s športom, v sprostitvenem salonu in med spolnim odnosom med menstruacijo!

Nova generacija tamponov

Odlično dopolnilo sanitetnim tamponom

Plavanje, savna, šport in spolni odnos so pogosto žrtve ženskega menstrualnega cikla. Kaj torej narediš, ko imaš menstruacijo pa se kljub temu želiš pozabavati s plavanjem ali vadbo? Uporabiš Mehki-Tampon kot odlično dopolnilo sanitetnim tamponom in čistilnim robčkom. Originalni Mehki-Tamponi so izdelani iz gobice, popolnoma brez vsake moteče vrvice.

Odlični za posebne trenutke

Originalni Mehki-Tamponi usklajujejo udobje med nošenjem in enostavno uporabo. Mehki-Tampon lahko odstranite enostavno z enim prstom zahvaljujoč integrirani zanki. Dermatološko testirani za fiziološko kompatibilnost; Mehki-Tampon je izdelan iz kože prijaznega materiala in ne vsebuje nobenih škodljivih snovi. Material je mehak in voljan in tako zelo udoben za uporabo.

Brezvrvična varnost v kritičnih dneh

Originalni Mehki-Tampon je bil razvit v skladu z znanimi aspekti v ginekologiji; uporablja se v savni, med športom, med plavanjem in prav tako med spolnim odnosom med menstruacijo.

- odlično, ergonomsko prileganje
- individualno, higiensko pakiranje
- koži prijazen, dermatološko in klinično testiran
- idealen za uporabo s spermicidi
- varen in koži prijazen material
- idealen za čist spolni odnos
- ni kontracepcija

Navodilo

Vedno si operi roke pred vstavljanjem in pred odstranjevanjem Mehkega-Tampona!

Vstavljanje

1. Odstrani ovoj tampona
2. da bi tampon lažje vstavili, priporočamo, da na konico suhega tampona naneseš manjšo količino lubrikanta ali ga navlažiš s čisto vodo. Nato tampon stisni (ožemi), da bo tampon lahko absorbiral čimveč tekočine.
3. Čepe ali sede na stranišču se tampon najlažje vstavi
4. Namesti svoj kazalec na eno od ravnih stranic tampona, s palcem in sredincem drži stranici tampona in tampon stisni. S to novo obliko, ki spominja na srce, dobi tampon ozko konico. V taki obliki zadrži tampon. Z drugo roko razpri sramne ustnice in potisni tampon v vagino tako daleč, da se dotakne materničnega vratu.

Kako dolgo ga lahko uporabljam:

Menjajte vaš tampon (kot katerikoli drug tampon) v rednih intervalih. Kako dolgo lahko uporabljate tampon je odvisno od intenzitete vaše menstruacije. Lahko, da boste morali menjati tampon pogostejše v začetku perila (vsake 3 do 5 ur). Ko se vaše perilo končuje, naj tampon ne bo vstavljen več kot 5 – 8 ur. Priporočamo vam, da v vsakem primeru menjate tampon vsake 4 do 6 ur. Z menjanjem Mehkega-Tampona po plavanju ali po spolnem odnosu zmanjšate možnost okužbe.

Odstranjevanje

Tampon se enostavno odstrani z integrirano zanko, povlecite zanko s kazalcem ali sredincem. Če se vam zgodi, da je tampon težko odstraniti, priporočamo, da počepnete saj je v tem položaju globina vagine zmanjšana z 9-10 cm na 4-5 cm. Z dodatnim pritiskom se tampon pomakne navzdol in ga je tako lažje doseči. Vaginalni tuš je lahko v pomoč, namočen tampon bo zdrsnil navzdol samodejno in ga bo tako enostavneje prijeti.

Za konec

Mehki tamponi niso kontracepcija. Mehki tamponi so varni za uporabo v kombinaciji s kondomi in kontracepcijskimi obročki. Če je bil kontracepcijski obroček ravno na novo vstavljen, prosimo, da se posvetujete z zdravnikom pred uporabo. Če tampona ne morete odstraniti, morate takoj poiskati medicinsko pomoč. Ne pozabite odstraniti zadnjega tampona ob koncu menstruacije!

Opozorilo – mehki tampon je samo za enkratno uporabo!

Lolita erotic shop, BTC Ljubljana, dvorana A, tel.: 068 947 645, www.lolita.si, info@lolita.si